

Der **Multi**-Rollstuhladapter
für den Einkauf "Shopper 150"

Ihre neue
Freiheit



Die Möglichkeiten mit dem
"Shopper 150"

www.rollstuhladapter.de

"Shopper 150" für den Einkauf

Mit Hilfe des MULTI-Rollstuhl adaptors "Shopper 150" können Sie einen Einkaufskorb, eine Tasche und einen Getränkeflaschen-Halter an einem Rollstuhl verwenden. Die verschiedenen Einkaufskörbe und Taschen, sowie der Getränkeflaschen-Halter, werden dabei von Ihnen auf einfache und sichere Weise mit Hilfe von Schnellbefestigungs-Aufnahmen am Haltebügel des "Shopper 150" befestigt.

Verbessern Sie die Mobilität und Selbstständigkeit bei Ihrem Einkauf !

Der Einkauf lässt sich sicher im Einkaufskorb, der vor Ihren Beinen schwebt, verstauen.

In die Tasche, die seitlich angebracht werden kann, passen z.B. alle Dinge, die sich normalerweise hinter Ihnen unsicher und unerreichbar in einem Rucksack befinden.

Der Haltebügel vom "Shopper 150" wird an zwei vorher montierten Aufnahmen eingeschoben und mit zwei Griffschrauben gesichert. Der Haltebügel ist in der Neigung, in der Höhe und in der Weite ergonomisch einstellbar. Sie können den "Shopper 150" daher optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Mit dem MULTI-Rollstuhl adapter "Shopper 150" und dem entsprechenden Zubehör sind Sie flexibel in der Art der Verwendung !



b e q u e m

Zubehör - Faltkorb

Für den größeren Einkauf können Sie den MULTI-Rollstuhladapter "Shopper 150" noch mit einem Faltkorb erweitern.

Eine gleichzeitige Verwendung mit dem Einkaufskorb, der Tasche und dem Getränkeflachen-Halter ist möglich.

Verbessern Sie die Mobilität und Selbstständigkeit bei Ihrem Einkauf !

Der Einkauf lässt sich im Faltkorb und im Einkaufskorb sicher verstauen.

In die Tasche, die seitlich angebracht werden kann, passen z.B. alle Dinge, die sich normalerweise hinter Ihnen unsicher und unerreichbar in einem Rucksack befinden.

Mit dem MULTI-Rollstuhladapter "Shopper 150" und dem entsprechenden Zubehör sind Sie flexibel in der Art der Verwendung !



Rollstuhltisch "Tavolo 150"

Erweitern lässt sich der MULTI-Rollstuhladapter "Shopper 150" noch mit einem Rollstuhltisch. Dieser schwebt dabei bequem über Ihren Beinen und ist ergonomisch einstellbar. Der "Shopper 150" wird nun zum Rollstuhltisch "Tavolo 150".

Nun haben Sie immer ihren eigenen Tisch dabei !

Nutzen Sie den Rollstuhltisch, um z.B. effektiv ein Tablet oder Notebook zu bedienen. Auch können Sie nun das Frühstück und andere Gegenstände sicher transportieren - zu Hause und auch unterwegs.

Der Rollstuhltisch ist groß genug für ein Notebook bis 15,4" incl. Mauspad.

Der Haltebügel vom Rollstuhltisch "Tavolo 150" wird an zwei vorher montierten Aufnahmen eingeschoben und mit zwei Griffschrauben gesichert. Der Rollstuhltisch ist in der Neigung, in der Höhe und in der Weite ergonomisch einstellbar. Sie können den Rollstuhltisch daher optimal an ihre Bedürfnisse anpassen.



bequem

Rollstuhltisch "Tavolo 150"

Dank der Belastbarkeit des Haltebügels von 15 kg ist eine gleichzeitige Verwendung mit dem Einkaufskorb, der Tasche und dem Getränkeflachen-Halter möglich.

Bringen Sie mehr Flexibilität & Erleichterung in Ihren Alltag !

Der große **Vorteil gegenüber bekannten Therapietischen:**

Dieser Rollstuhltisch engt Sie nicht ein, lässt sich ergonomisch einstellen und kann an allen gängigen Rollstühlen befestigt werden.



Informationen zum MULTI-Rollstuhladapter

“Shopper 150“ für den Einkauf

Der MULTI-Rollstuhladapter ist ein Zubehör für den Rollstuhl, um Ihnen als Rollstuhlfahrer das Alltagsleben zu erleichtern. Die Bedienung des Adapters für den Einkauf ist einfach, sicher und weltweit einzigartig.

Mit Hilfe des MULTI-Rollstuhladapters und seiner zahlreichen Aufsätze können Sie nun Ihren Alltag selbstständig und unabhängig gestalten.

Haben Sie Fragen zum MULTI-Rollstuhladapter? **Wir beraten Sie gerne!** Oder vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung bei Ihnen zu Hause.

Erleben Sie die Vorzüge und die vielfältigen Möglichkeiten des Adapters.



Kontakt:

Michael Tanneberger

Rheinkamper Str. 10 a
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 700 83

Handy: 0 176 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de

Der **Multi**-Rollstuhladapter Teilekatalog "Shopper 150"





“Shopper 150“ für den Einkauf: (gefertigt aus Aluminium / Gewicht Bügel: 750 g)

Der Haltebügel vom “Shopper 150“ wird an zwei vorher montierten Aufnahmen eingeschoben und mit zwei Griffschrauben gesichert.

Über den Adapter kann der Einkaufskorb in der Neigung und in der Weite ergonomisch eingestellt werden.

Der Einkaufskorb wird auf einfache Weise in eine Schnellbefestigungs-Aufnahme angeklickt. Er ist ideal für den kleinen Einkauf oder den großen Ausflug, ausgestattet mit separatem Innenfach für Geldbörse und Schlüssel, Frontreflektor und abnehmbarer Regenhaube.

Maße: L: 38 cm, B: 29 cm, H: 25 cm / Volumen: 24 L / max. Belastung: 7,0 Kg

- Bitte geben Sie bei der Bestellung den Rohrdurchmesser mit an und ob es sich um ein rundes oder ein ovales Rohr handelt!

Artikel Nr.: 22.5000.2000



Ersatz-Aufnahme: (gefertigt aus Edelstahl / Gewicht: 650 g)

Mit den beiden Rohrschellen und der Aufnahme kann ein weiterer Rollstuhl ausgestattet werden. Zum schnellen Wechsel des "Shopper 150" bei der Nutzung mehrerer Rollstühle.

- Bitte geben Sie bei der Bestellung den Rohrdurchmesser mit an und ob es sich um ein rundes oder ein ovales Rohr handelt!

Artikel Nr.: 22.01.55

Wichtig:

Die max. Belastung des MULTI-Rollstuhladapter "Shopper 150" beträgt 15,0 Kg !

Bei Verwendung des MULTI-Rollstuhladapter "Shopper 150" verringert sich das max. Benutzergewicht für den Rollstuhl um 20 kg !

“Shopper 150“ für den Einkauf



Schnellbefestigungs-Aufnahme "Mount - Bag 10.1":

Die Schnellbefestigungs-Aufnahme wird seitlich am senkrechten Rohr vom Haltebügel montiert. Hier können nun die verschiedenen Taschen befestigt werden.

max. Belastung: 3,0 Kg

Artikel Nr.: 22.10.10



Tasche "Bag 10.2" 5 Liter:

- Design: black -

Die Tasche wird auf einfache Weise in die Schnellbefestigungs-Aufnahme angeklickt. Sie ist ausgestattet mit RV-Frontfach, Hauptfach und beidseitigen Netztaschen.

Maße: L: 33 cm, B: 14 cm, H: 22 cm / **Volumen: 5,0 L** / max. Belastung: 3,0 Kg

Artikel Nr.: 22.10.20



Schnellbefestigungs-Aufnahme "Mount - Bottle 10.4":

Die Schnellbefestigungs-Aufnahme wird am senkrechten Rohr vom Haltebügel montiert. Hier kann nun eine Flasche oder ein passender Becher in den Flaschenhalter gesteckt werden.

(incl. Flaschenhalter)

max. Belastung: 1,0 Kg

Artikel Nr.: 22.10.40



senkrecht Element:

Das senkrechte Element wird benötigt, um den "Shopper 150" mit dem Rollstuhltisch oder mit dem Faltkorb zu erweitern.

max. Belastung: 8,0 Kg

Artikel Nr.: 22.04.20

Rollstuhltisch (incl. Anti-Rutsch-Matte):

(benötigtes Zubehör: senkrecht Element - Artikel-Nr. 22.04.20)



Der Rollstuhltisch wird entweder direkt am senkrechten Element montiert oder er wird mit Hilfe eines Schnellbefestigungs-Aufnahme-Sets, der Aufnahmeplatte mit Verriegelung und der Befestigungsplatte, lösbar mit dem senkrechten Element verbunden.

Über den Adapter kann der Rollstuhltisch in der Neigung, in der Höhe und in der Weite ergonomisch eingestellt werden.

Maße: L: 50 cm, B: 30 cm, H: 1,5 cm / Farbe: schwarz / max. Belastung: 8,0 Kg

Artikel Nr.: 22.15.10

Falkkorb 24 Liter:

(benötigtes Zubehör: senkrecht Element - Artikel-Nr. 22.04.20)



- Designs: grau / blau / grün -

Der Falkkorb wird entweder direkt am senkrechten Element montiert oder er wird mit Hilfe eines Schnellbefestigungs-Aufnahme-Sets, der Aufnahmeplatte mit Verriegelung und der Befestigungsplatte, lösbar mit dem senkrechten Element verbunden.

Der Falkkorb 24 Liter ist ausgestattet mit einem längsseitigen Tragegriff für einhändiges Tragen.

Maße: L: 43,5 cm, B: 31 cm, H: 21,3 cm / max. Belastung: 8,0 Kg

Artikel Nr.: 22.15.20

Aufnahmeplatte mit Verriegelung und Befestigungsplatte:

(für Rollstuhltisch und Falkkörbe)



Dieses Schnellbefestigungs-Aufnahme-Set wird benötigt um den Rollstuhltisch und den Falkkorb auf einfache Weise und schnell wechseln zu können.

Dabei wird die Aufnahmeplatte mit Verriegelung am senkrechten Element und jeweils eine Befestigungsplatte unter dem Rollstuhltisch und eine unter dem Falkkorb montiert.

Artikel Nr.: 22.06.30

Weitere Produkte ...



MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch " Tavolo 160 "

Der "Tavolo 160" hat eine max. Tragkraft von 5kg und kann neben dem Rollstuhltisch noch mit einer Tasche erweitert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie lediglich mit einem Tablet oder Notebook arbeiten wollen und nur leichte Dinge transportieren.

Suchen Sie eine Halterung für einen Einkaufskorb, ist der "Shopper 150" die richtige Wahl !



MULTI-Rollstuhladapter als Foto-Stativ " Stativo 160 "

Als Basis für das Foto-Stativ "Stativo 160" dient die Konstruktion des "Tavolo 160". Erweiterbar ist der Haltearm noch mit einer Tasche.

Ausgestattet ist die Erweiterung mit einem Gewindeadapter mit 3/8" UNC auf 1/4" UNC Gewinde für alle gängigen Stativ-Neiger und auch dem Smartphone-Neiger.



MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch " Tavolo 150 "

Der "Tavolo 150" hat eine max. Tragkraft von 15kg und kann neben dem Rollstuhltisch noch einen Einkaufskorb, eine Tasche und einen Getränkeflaschen-Halter aufnehmen.

Er ist perfekt, wenn Sie mit einem Tablet oder Notebook arbeiten, unterwegs einen Tisch haben wollen und ihn für den größeren Einkauf nutzen.



MULTI-Rollstuhladapter für den Einkauf " Shopper 150 "

Als Basis für den "Shopper 150" dient die Konstruktion des "Tavolo 150". Mit Hilfe von Schnellbefestigungs-Aufnahmen kann dieser mit einem Einkaufskorb, einer Tasche, einem Getränkeflaschen-Halter und einem Tisch erweitert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie ihn für den größeren Einkauf nutzen, unterwegs einen Tisch haben wollen oder zu Hause mit einem Tablet oder Notebook arbeiten.



MULTI-Rollstuhladapter fürs Baby & Kind " Bambino 140 "

Mit dem "Bambino 140" kann ein Baby oder Kind, angeschnallt in einer Liegeschale für Babys oder Sitzschale für Kinder, sicher befördert werden und dies durch die Tragkraft von 18 kg bis ca. zum 3. Lebensjahr.

Erweitern lässt sich der "Bambino 140" jederzeit mit einem Einkaufskorb, einer Tasche oder auch einem Rollstuhltisch. Mit dem "Bambino 140" und dem entsprechenden Zubehör sind Sie flexibel in der Art der Verwendung.

Der **M**ulti-Rollstuhladapter für den Einkauf "Shopper 150"

Mit wenigen Handgriffen lässt sich auch Ihr Rollstuhl um praktische Zusatzfunktionen erweitern.

Stempelfeld Sanitätshaus:



Kontakt:

Michael Tanneberger

Rheinkamper Str. 10 a
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 700 83
Handy: 0 176 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de