

Der **Multi**-Rollstuhladapter  
Rollstuhltisch "Tavolo 160"

Ihre neue  
*Freiheit*



Die Möglichkeiten mit dem Rollstuhltisch  
"Tavolo 160"

[www.rollstuhladapter.de](http://www.rollstuhladapter.de)

# Rollstuhltisch "Tavolo 160"

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0802)

Mit Hilfe des MULTI-Rollstuhladapters "Tavolo 160" können Sie einen Rollstuhltisch selbstständig und sicher mit einem Rollstuhl verbinden. Er schwebt dabei bequem über Ihren Beinen und ist ergonomisch einstellbar.

**Nun haben Sie immer ihren eigenen Tisch dabei !**

Nutzen Sie den Rollstuhltisch, um z.B. effektiv ein Tablet oder Notebook zu bedienen. Auch können Sie nun das Frühstück und andere Gegenstände sicher transportieren - zu Hause und auch unterwegs.

Der Rollstuhltisch "Tavolo 160" wird mit einer Hebelschraube einfach an einer vorher montierten Rohrschelle an den Rollstuhl befestigt. Der Adapter besitzt zwei teleskopierbare Arme und drei Zahngelenkköpfe. Sie können den "Tavolo 160" daher optimal an ihre Bedürfnisse anpassen.

Der Rollstuhltisch "Tavolo 160" ist groß genug für ein Notebook bis 15,4". Dabei wird das Notebook mit zwei Klettbindern sicher auf dem Tisch befestigt.

**Bringen Sie mehr Flexibilität & Erleichterung in Ihren Alltag !**

Der große **Vorteil gegenüber bekannten Therapietischen:**

Dieser Rollstuhltisch engt Sie nicht ein, lässt sich ergonomisch einstellen und kann an allen gängigen Rollstühlen befestigt werden.



**bequem**

# Rollstuhltisch "Tavolo 160"

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0802)

Erweitern lässt sich der Haltearm des "Tavolo 160" noch mit einer KLICKfix®-Aufnahme. Nun haben Sie auch die Möglichkeit eine Tasche am Haltearm zu befestigen.

**Wichtig:** Dieser Haltearm ist aufgrund seiner max. Tragkraft von 5kg lediglich mit dem Rollstuhltisch und einer Tasche kombinierbar.

**Suchen Sie eine Halterung für einen Einkaufskorb, ist der "Shopper 150" die richtige Wahl für Sie!**



## Foto-Stativ "Stativo 160"

Mit Hilfe einer Erweiterung ist der Rollstuhltisch "Tavolo 160" als Foto-Stativ nutzbar. Ausgestattet ist die Erweiterung mit einem Gewindeadapter mit 3/8" UNC auf 1/4" UNC Gewinde für alle gängigen Stativ-Neiger.

**Nun haben Sie immer ein komfortables Foto-Stativ dabei !**

Nutzen Sie das Foto-Stativ, um einfach und sicher Ihre Kamera oder Ihr Smartphone zu halten. Es lassen sich nun ohne die lästigen Auf- und Abbauten eines normalen Stativs Fotos und Videos erstellen.

Durch die zwei teleskopierbaren Arme und drei Zahngelenkköpfe können Sie das Foto-Stativ optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen.

**Bringen Sie mehr Flexibilität & Erleichterung in Ihr Hobby !**



**b e q u e m**

## Foto-Stativ "Stativo 160"

Anstelle eines Stativ-Kopfes kann auch ein Smartphone-Neiger verwendet werden. Damit lassen sich auch mit dem Smartphone leicht Fotos und Videos erstellen.

Erweitern lässt sich der Haltearm vom "Stativo 160" noch mit einer KLICKfix®-Aufnahme. Nun haben Sie auch die Möglichkeit eine Tasche am Haltearm zu befestigen. Dort lässt sich das Foto-Zubehör sicher verstauen.

**Wichtig:** Dieser Haltearm ist aufgrund seiner max. Tragkraft von 5kg lediglich mit dem Stativ-Kopf bzw. dem Smartphone-Neiger und einer Tasche kombinierbar.



# Informationen zur Beantragung des MULTI-Rollstuhladapters

## “Tavolo 160“ mit Rollstuhltisch

Der MULTI-Rollstuhladapter ist ein Zubehör für den Rollstuhl, um Ihnen als Rollstuhlfahrer das Alltagsleben zu erleichtern. Die Bedienung des Adapters mit Rollstuhltisch ist einfach, sicher und weltweit einzigartig.

Mit Hilfe des MULTI-Rollstuhladapters und seiner zahlreichen Aufsätze können Sie nun Ihren Alltag selbstständig und unabhängig gestalten.

### So sollten die Angaben auf Ihrem Rezept stehen:

- MULTI-Rollstuhladapter “Tavolo 160“ mit Rollstuhltisch  
Abrechnungsposition: 18.99.99.0802

**Mögliche Kostenträger sind:** Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungen, Integrationsamt, Amt für Soziales . . .

### Gerne besprechen wir mit Ihnen den Bestellvorgang!

Haben Sie Fragen zum MULTI-Rollstuhladapter? **Wir beraten Sie gerne!** Oder vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung bei Ihnen zu Hause.

Erleben Sie die Vorzüge und die vielfältigen Möglichkeiten des Adapters.



### Kontakt:

**Michael Tanneberger**

Rheinkamper Str. 10 a  
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 700 83

Handy: 0 176 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de

# Beantragung

# Der **Multi**-Rollstuhladapter Teilekatalog "Tavolo 160"





**Rollstuhltisch "Tavolo 160" :** (gefertigt aus Aluminium / Gewicht: 1.500 g)

Der Rollstuhltisch "Tavolo 160" wird mit einer Hebelschraube an einer vorher montierten Rohrschelle an den Rollstuhl befestigt. Der Adapter besitzt zwei teleskopierbare Arme und drei Zahngelenkköpfe und kann daher optimal an die Bedürfnisse angepasst werden.

Der Rollstuhltisch "Tavolo 160" ist groß genug für ein Notebook bis 15,4". Dabei wird das Notebook mit zwei Klettbandern sicher auf dem Tisch befestigt.

An Stelle des Tisches kann die Erweiterung zum Foto-Stativ eingesetzt werden. Nun ist der Rollstuhltisch "Tavolo 160" ein Foto-Stativ.

(Hierfür benötigt man das Zubehör 20.16.20)

- Die Rohrschelle ist lediglich für runde Rohre geeignet !
- Bitte geben Sie bei der Bestellung den Rohrdurchmesser mit an !

Maße Tisch: 32 x 25 cm / Tragkraft: max. 5 kg

Artikel Nr.: 20.6000.0000

**Ersatz-Aufnahme:** (gefertigt aus Edelstahl / Gewicht: 50 g)



Mit dieser Rohrschelle kann ein weiterer Rollstuhl ausgestattet werden. Zum schnellen Wechsel des Rollstuhltisches "Tavolo 160" bei der Nutzung mehrerer Rollstühle.

- Die Rohrschelle ist lediglich für runde Rohre geeignet !
- Bitte geben Sie bei der Bestellung den Rohrdurchmesser mit an !

Artikel Nr.: 20.01.65

**Wichtig:**

**Die max. Belastung des MULTI-Rollstuhladapter "Tavolo 160" beträgt 5,0 Kg !**

**Bei Verwendung des MULTI-Rollstuhladapter "Tavolo 160" verringert sich das max. Benutzergewicht für den Rollstuhl um 8 kg !**

# Rollstuhltisch "Tavolo 160"





### KLICKfix® Halter "Caddy" (von Rixen&Kaul):

Der KLICKfix®-Halter "Caddy" wird seitlich am senkrechten Rohr des "Tavolo 150" montiert. Hier können nun die verschiedenen Taschen befestigt werden.

max. Belastung: 3,0 Kg

Artikel Nr.: 20.15.30



### Tasche "Roomy" 4,0 Liter (von Rixen&Kaul):

- Designs: black / black dots coloured / black dots / twist silver / millefleurs -

Die Tasche wird auf einfache Weise in den KLICKfix®-Halter angeklickt. Sie ist ausgestattet mit RV-Frontfach, Hauptfach mit weiter Öffnung und innen liegenden separaten Extrafächern.

Maße: L: 24 cm, B: 13 cm, H: 22 cm / Volumen: 4,0 L / max. Belastung: 3,0 Kg

Artikel Nr.: 20.11.10



### Tasche "Allegra" 5,0 Liter (von Rixen&Kaul):

- Design: black -

Die Tasche wird auf einfache Weise in den KLICKfix®-Halter angeklickt. Sie ist ausgestattet mit RV-Frontfach, Hauptfach und beidseitigen Netztaschen.

Maße: L: 33 cm, B: 14 cm, H: 22 cm / Volumen: 5,0 L / max. Belastung: 3,0 Kg

Artikel Nr.: 20.11.20

### **Erweiterung zum Foto-Stativ (für Rollstuhltisch "Tavolo 160"):**



Mit Hilfe dieser Erweiterung ist der Rollstuhltisch "Tavolo 160" als Foto-Stativ nutzbar.

Ausgestattet ist die Platte mit einem Gewindeadapter mit 3/8" UNC auf 1/4" UNC Gewinde für alle gängigen Stativ-Neiger und auch dem Smartphone-Neiger.

Artikel Nr.: 20.16.20

### **Stativ-Kopf "Manfrotto MH804-3W":**



Der Stativ-Kopf "Manfrotto MH804-3W" ist ein stabiler 3-Wege-Kopf für DSLR- und CSC-Kameras.

max. Belastung: 4 kg

Artikel Nr.: 20.16.30

### **Smartphone-Neiger "JOBY GripTight Pro Video":**



Der Smartphone-Neiger ist mit einer Fluid-Schwenk- und Neigefunktion ausgestattet. Dies macht ihn zu einem perfekten Hilfsmittel für professionelle und mobile Fotos und auch Videos.

Artikel Nr.: 20.16.40

# Weitere Produkte ...



## **MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch " Tavolo 160 "**

Der "Tavolo 160" hat eine max. Tragkraft von 5kg und kann neben dem Rollstuhltisch noch mit einer Tasche kombiniert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie lediglich mit einem Tablet oder Notebook arbeiten wollen und nur leichte Dinge transportieren.

Suchen Sie eine Halterung für einen Einkaufskorb, ist der "Shopper 150" die richtige Wahl !



## **MULTI-Rollstuhladapter als Foto-Stativ " Stativo 160 "**

Als Basis für das Foto-Stativ "Stativo 160" dient der Rollstuhltisch "Tavolo 160". Mit Hilfe einer Erweiterung ist er als Foto-Stativ nutzbar.

Ausgestattet ist die Erweiterung mit einem Gewindeadapter mit 3/8" UNC auf 1/4" UNC Gewinde für alle gängigen Stativ-Neiger und auch dem Smartphone-Neiger.



## **MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch " Tavolo 150 "**

Der "Tavolo 150" hat eine max. Tragkraft von 15kg und kann neben dem Rollstuhltisch noch mit einem Einkaufskorb, einer Tasche und einem Getränkeflaschen-Halter kombiniert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie mit einem Tablet oder Notebook arbeiten, unterwegs einen Tisch haben wollen und ihn für den größeren Einkauf nutzen.



## **MULTI-Rollstuhladapter für den Einkauf " Shopper 150 "**

Als Basis für den "Shopper 150" dient der Rollstuhltisch "Tavolo 150". Mit Hilfe eines KLICKfix®-Halters kann dieser mit einem Einkaufskorb und einer Tasche, sowie einem Getränkeflaschen-Halter erweitert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie ihn für den größeren Einkauf nutzen, unterwegs einen Tisch haben wollen oder zu Hause mit einem Tablet oder Notebook arbeiten.



## **MULTI-Rollstuhladapter fürs Baby & Kind " Bambino 140 "**

Mit dem "Bambino 140" kann ein Baby oder Kind, angeschnallt in einer Liegeschale für Babys oder Sitzschale für Kinder, sicher befördert werden und dies durch die Tragkraft von 18kg bis ca. zum 3. Lebensjahr.

Erweitern lässt sich der "Bambino 140" jederzeit mit einem Einkaufskorb, einer Tasche oder auch einem Rollstuhltisch. Mit dem "Bambino 140" und dem entsprechenden Zubehör sind Sie flexibel in der Art der Verwendung.

# Der **Multi**-Rollstuhladapter Rollstuhltisch "Tavolo 160"

Mit wenigen Handgriffen lässt sich auch Ihr Rollstuhl um praktische Zusatzfunktionen erweitern.

Stempelfeld Sanitätshaus:



## Kontakt:

**Michael Tanneberger**

Rheinkamper Str. 10 a  
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 700 83  
Handy: 0 176 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de

Fotos: M. Tanneberger

1. Auflage

[www.rollstuhladapter.de](http://www.rollstuhladapter.de)

© Michael Tanneberger