

Der **Multi**-Rollstuhladapter
für den Einkauf "Shopper 150"

Ihre neue *Freiheit*



Die Möglichkeiten mit dem
"Shopper 150"

www.rollstuhladapter.de

"Shopper 150" für den Einkauf

Als Basis für den "Shopper 150" dient der MULTI-Rollstuhladapter "Tavolo 150" mit Rollstuhltisch. Dieser kann mit einem Einkaufskorb, einer Tasche und einem Getränkeflaschen-Halter erweitert werden. Die verschiedenen Einkaufskörbe und Taschen, sowie der Getränkeflaschen-Halter, werden dabei von Ihnen auf einfache und sichere Weise mit Hilfe des KLICKfix® Systems am "Shopper 150" befestigt und das bei gleichzeitiger Verwendung des Rollstuhltisches oder des Faltkorbes.

Verbessern Sie die Mobilität und Selbstständigkeit bei Ihrem Einkauf !

Der Einkauf lässt sich sicher im Einkaufskorb, der vor Ihren Beinen schwebt, verstauen.

In die Tasche, die seitlich angebracht werden kann, passen z.B. alle Dinge, die sich normalerweise hinter Ihnen unsicher und unerreichbar in einem Rucksack befinden.

Mit dem MULTI-Rollstuhladapter "Shopper 150" und dem entsprechenden Zubehör sind Sie flexibel in der Art der Verwendung !



b e q u e m

Zubehör - Faltkorb

Für den größeren Einkauf können Sie den MULTI-Rollstuhladapter "Shopper 150" noch mit einem Faltkorb erweitern. Der Faltkorb wird an Stelle des Rollstuhltisches befestigt. Eine gleichzeitige Verwendung mit dem Einkaufskorb, der Tasche und dem Getränkeflachen-Halter ist möglich.

Verbessern Sie die Mobilität und Selbstständigkeit bei Ihrem Einkauf !

Der Einkauf lässt sich im Faltkorb und im Einkaufskorb sicher verstauen.

In die Tasche, die seitlich angebracht werden kann, passen z.B. alle Dinge, die sich normalerweise hinter Ihnen unsicher und unerreichbar in einem Rucksack befinden.

Mit dem MULTI-Rollstuhladapter "Shopper 150" und dem entsprechenden Zubehör sind Sie flexibel in der Art der Verwendung !



Rollstuhltisch "Tavolo 150"

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0802)

Der MULTI-Rollstuhladapter "Tavolo 150" dient als Basis für den "Shopper 150". Sie können nun einen Rollstuhltisch selbstständig und sicher mit einem Rollstuhl verbinden. Er schwebt dabei bequem über Ihren Beinen und ist ergonomisch einstellbar.

Nun haben Sie immer ihren eigenen Tisch dabei !

Nutzen Sie den Rollstuhltisch, um z.B. effektiv ein Tablet oder Notebook zu bedienen. Auch können Sie nun das Frühstück und andere Gegenstände sicher transportieren - zu Hause und auch unterwegs.

Der Bügel vom Rollstuhltisch "Tavolo 150" wird an zwei vorher montierten Aufnahmen eingeschoben und mit zwei Griffschrauben gesichert. Der Rollstuhltisch ist in der Neigung, in der Höhe und in der Weite ergonomisch einstellbar. Sie können den "Tavolo 150" daher optimal an ihre Bedürfnisse anpassen.

Der Rollstuhltisch "Tavolo 150" ist groß genug für ein Notebook bis 15,4" incl. Mauspad.

Erweiterbar ist der Adapter, dank seiner Belastbarkeit von 15 kg, noch mit dem Faltkorb, dem Einkaufskorb, der Tasche und dem Getränkeflaschen-Halter.

Bringen Sie mehr Flexibilität & Erleichterung in Ihren Alltag !

Der große **Vorteil gegenüber bekannten Therapietischen:**

Dieser Rollstuhltisch engt Sie nicht ein, lässt sich ergonomisch einstellen und kann an allen gängigen Rollstühlen befestigt werden.



bequem

Zubehör - Vorsatzrad

Option für Unterwegs:

Der **MULTI-Rollstuhladapter** kann für die Fahrten außerhalb der Wohnung mit einem **Vorsatzrad erweitert werden**. Das Vorsatzrad von 12,5 Zoll hebt die kleinen Vorderräder an und sorgt so für ein verbessertes Fahrverhalten und zugleich für die Federung.



zum Beispiel:

... ohne Vorsatzrad

Rollstuhltisch in Kombination
mit dem Einkaufskorb
und der Tasche



... mit Vorsatzrad

Rollstuhltisch in Kombination
mit dem Einkaufskorb
und der Tasche

Informationen zur Beantragung des MULTI-Rollstuhl adaptors

“Tavolo 150“ mit Rollstuhltisch

Der MULTI-Rollstuhl adaptor ist ein Zubehör für den Rollstuhl, um Ihnen als Rollstuhlfahrer das Alltagsleben zu erleichtern. Die Bedienung des Adaptors mit Rollstuhltisch ist einfach, sicher und weltweit einzigartig.

Mit Hilfe des MULTI-Rollstuhl adaptors und seiner zahlreichen Aufsätze können Sie nun Ihren Alltag selbstständig und unabhängig gestalten.

So sollten die Angaben auf Ihrem Rezept stehen:

- MULTI-Rollstuhl adaptor “Tavolo 150“ mit Rollstuhltisch
Abrechnungsposition: 18.99.99.0802

Mögliche Kostenträger sind: Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungen, Integrationsamt, Amt für Soziales . . .

Gerne besprechen wir mit Ihnen den Bestellvorgang!

Haben Sie Fragen zum MULTI-Rollstuhl adaptor? **Wir beraten Sie gerne!** Oder vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung bei Ihnen zu Hause.

Erleben Sie die Vorzüge und die vielfältigen Möglichkeiten des Adaptors.



Kontakt:

Michael Tanneberger

Rheinkamper Str. 10 a
47495 Rheinberg


Telefon: 0 28 43 / 91 700 83

Handy: 0 176 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de

Beantragung

Der **Multi**-Rollstuhladapter Teilekatalog "Shopper 150"

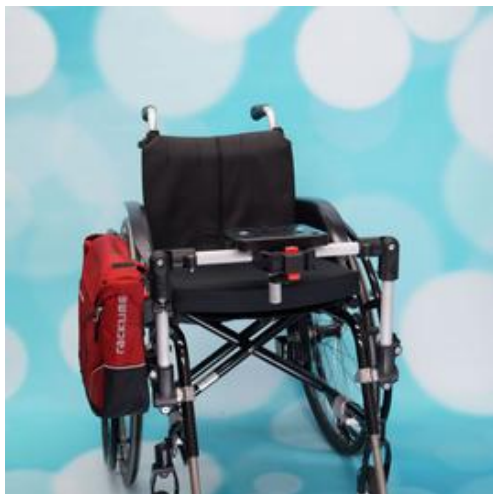



Rollstuhltisch "Tavolo 150" : (gefertigt aus Aluminium & Holz / Gewicht Bügel: 750 g)

Der Bügel vom Rollstuhltisch "Tavolo 150" wird an zwei vorher montierten Aufnahmen eingeschoben und mit zwei Griffschrauben gesichert.

Über den Adapter kann der Rollstuhltisch in der Neigung, in der Höhe und in der Weite ergonomisch eingestellt werden.

Der Rollstuhltisch ist groß genug für ein Notebook bis 15,4" incl. Mauspad.
(incl. Anti-Rutsch-Matte / Maße: 50 x 30 x 1,5 cm)



- Die Rohrschellen sind lediglich für runde Rohre geeignet !
- Bitte geben Sie bei der Bestellung den Rohrdurchmesser mit an !

Artikel Nr.: 20.5002.0020 s - Farbe: schwarz

Artikel Nr.: 20.5002.0020 w - Farbe: weiß



Ersatz-Aufnahme: (gefertigt aus Edelstahl / Gewicht: 650 g)

Mit den beiden Rohrschellen und der Aufnahme kann ein weiterer Rollstuhl ausgestattet werden. Zum schnellen Wechsel des Rollstuhltisches "Tavolo 150" bei der Nutzung mehrerer Rollstühle.

- Die Rohrschelle ist lediglich für runde Rohre geeignet !
- Bitte geben Sie bei der Bestellung den Rohrdurchmesser mit an !

Artikel Nr.: 20.01.55

Wichtig:

Die max. Belastung des MULTI-Rollstuhladapter "Tavolo 150" beträgt 15,0 Kg !

Bei Verwendung des MULTI-Rollstuhladapter "Tavolo 150" verringert sich das max. Benutzergewicht für den Rollstuhl um 20 kg !

Rollstuhltisch "Tavolo 150"

KLICKfix® Halter E (ohne Schloss / für Körbe & Taschen / von Rixen&Kaul):



Der KLICKfix® Halter wird am horizontalen Rohr vom Bügel montiert. Hier können nun die verschiedenen Körbe und Taschen befestigt werden.

max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 20.15.20

KLICKfix® Halter E (mit Schloss / für Körbe & Taschen / von Rixen&Kaul):



Der KLICKfix® Halter wird am horizontalen Rohr vom Bügel montiert. Hier können nun die verschiedenen Körbe und Taschen befestigt werden. Ein hochwertiges Metallschloss ist in die rote Taste fest integriert und sperrt zuverlässig den Auslösemechanismus. So ist der Einkaufskorb oder die Tasche maximal gesichert.

max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 20.15.25



Einkaufskorb „Shopper Plus“ 24 Liter (von Rixen&Kaul):

Der Einkaufskorb wird auf einfache Weise in den KLICKfix® Halter angeklickt. Er ist ideal für den kleinen Einkauf oder den großen Ausflug, ausgestattet mit separatem Innenfach für Geldbörse und Schlüssel, Frontreflektor und abnehmbarer Regenhaube.

Maße: L: 38 cm, B: 29 cm, H: 25 cm / Volumen: 24 L / max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 20.10.40



Einkaufskorb „Bikebasket“ 15 Liter (von Reisetel):

(Designs: black / black dots coloured / millefleurs / artist stripes)

Der Einkaufskorb wird auf einfache Weise in den KLICKfix® Halter angeklickt. Er ist ideal für den kleinen Einkauf oder den großen Ausflug, ausgestattet mit Fronttasche, Kordelverschluss, Innentasche mit Reißverschluss, Handyfach und abnehmbarem Utensilientäschchen.

Maße: L: 35 cm, B: 26 cm, H: 28 cm / Volumen: 15 L / max. Belastung: 5,0 Kg



Artikel Nr.: 20.10.60



KLICKfix® Halter "Caddy" (von Rixen&Kaul):

Der KLICKfix®-Halter "Caddy" wird seitlich am senkrechten Rohr des "Tavolo 150" montiert. Hier können nun die verschiedenen Taschen befestigt werden.

max. Belastung: 3,0 Kg

Artikel Nr.: 20.15.30



Tasche "Roomy" 4,0 Liter (von Rixen&Kaul):

- Designs: black / black dots coloured / black dots / twist silver / millefleurs -

Die Tasche wird auf einfache Weise in den KLICKfix®-Halter angeklickt. Sie ist ausgestattet mit RV-Frontfach, Hauptfach mit weiter Öffnung und innen liegenden separaten Extrafächern.

Maße: L: 24 cm, B: 13 cm, H: 22 cm / Volumen: 4,0 L / max. Belastung: 3,0 Kg

Artikel Nr.: 20.11.10



Tasche "Allegra" 5,0 Liter (von Rixen&Kaul):

- Design: black -

Die Tasche wird auf einfache Weise in den KLICKfix®-Halter angeklickt. Sie ist ausgestattet mit RV-Frontfach, Hauptfach und beidseitigen Netztaschen.

Maße: L: 33 cm, B: 14 cm, H: 22 cm / Volumen: 5,0 L / max. Belastung: 3,0 Kg

Artikel Nr.: 20.11.20



Tasche "SmartBag Touch" 1,8 Liter (von Rixen&Kaul):

- Designs: black / twist silver -

Die Tasche wird auf einfache Weise in den KLICKfix®-Halter angeklickt. Sie ist ausgestattet mit RV-Frontfach, Hauptfach mit mehreren Innenfächern und Smartphone-Fach im Taschendeckel (für Smartphones bis max. 18 x 9 cm). Das Smartphone bleibt durch die Folie weiter bedienbar.

Maße: L: 21 cm, B: 8 cm, H: 16 cm / Volumen: 1,8 L / max. Belastung: 2,0 Kg

Artikel Nr.: 20.11.30



Rucksack "Freepack City" 18 Liter (von Rixen&Kaul):

- Design: twist silver -

Der Rucksack wird auf einfache Weise in den KLICKfix®-Halter angeklickt. Er ist ausgestattet mit zwei abgedeckten Frontfächern, seitlichen Fächern, separater Innentasche und Regenhülle.

Maße: L: 26 cm, B: 15 cm, H: 38 cm / Volumen: 18 L / max. Belastung: 5,0 Kg

Artikel Nr.: 20.11.40





Faltkorb 24 Liter (incl. Befestigungsplatte):

- Designs: grau / blau / grün -

Der Faltkorb 24 Liter wird auf einfache Weise an der montierten Aufnahmeplatte am senkrechten Element des MULTI-Rollstuhladapters befestigt und gesichert.

Maße: L: 43,5 cm, B: 31 cm, H: 21,3 cm / max. Belastung: 8,0 Kg



Artikel Nr.: 20.09.30



Faltkorb 32 Liter (incl. Befestigungsplatte):

- Designs: grau / blau / grün -

Der Faltkorb 32 Liter wird auf einfache Weise an der montierten Aufnahmeplatte am senkrechten Element des MULTI-Rollstuhladapters befestigt und gesichert.

Maße: L: 49 cm, B: 36 cm, H: 25 cm / max. Belastung: 10,0 Kg



Artikel Nr.: 20.09.40



Rollstuhltisch (incl. Befestigungsplatte & Anti-Rutsch-Matte):



Der Rollstuhltisch wird auf einfache Weise an der montierten Aufnahmeplatte am senkrechten Rohr des MULTI-Rollstuhl adaptors befestigt und gesichert.

Über den Adapter kann der Rollstuhltisch in der Neigung, in der Höhe und in der Weite ergonomisch eingestellt werden.

Maße: L: 50 cm, B: 30 cm, H: 1,5 cm / max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 20.15.10 s - Farbe: schwarz

Artikel Nr.: 20.15.10 w - Farbe: weiß



KLIICKfix® Halter "Bottle Klick" (incl. Getränkeflaschen-Halter):

Der KLIICKfix® -Halter "Bottle Klick" wird seitlich am senkrechten Rohr des "Tavolo 150" montiert. Hier kann nun der Getränkeflaschen-Halter angeklickt werden.

max. Belastung: 1,0 Kg

Artikel Nr.: 20.15.40



Weiteres Zubehör auf Anfrage !

Zubehör - Rollstuhltisch ...

Vorsatzrad "FreeWheel"

- Vertrieb in Deutschland von „The Rolling Company“ / www.therollingcompany.de



Das "FreeWheel" kann Sie auf Ihrer Tour über Stock und Stein unterstützen. Es erleichtert das Überwinden von Hindernissen und gibt ein Gefühl von Freiheit und Sicherheit bei grenzenloser Mobilität!

Das "FreeWheel" ist Ihr Ticket um sicher und schnell über jede Art von Untergrund zu kommen und sich nicht mehr über Löcher in der Straße, Dreck, Steine, Matsch oder Schnee ärgern zu müssen. Als aktiver Rollstuhlfahrer werden Sie das "FreeWheel" lieben.

In wenigen Sekunden ist das "FreeWheel" an Ihrem Starrrahmen-Rollstuhl befestigt und hebt die Vorderräder an um aus dem Rollstuhl ein Gelände-Dreirad zu machen.

Mit dem "FreeWheel" können Sie sicher über Oberflächen rollen, die sonst nahezu unmöglich wären. Man braucht nicht mehr ständig im Wheelie über Rasenflächen, Kanten oder Schotterpisten fahren, sondern rollt einfach normal drüber.

Kompatibilität:

Das "FreeWheel" passt an viele gängige Starrrahmen-Rollstühle, die eine Fußplatte bzw. einen Fußbügel haben.

Artikel Nr.: 20.08.10

Adapter für Vorsatzrad "FreeWheel":



Sie haben einen falt-Rollstuhl und möchten trotzdem das "FreeWheel" nutzen? Sie haben zwar einen Starrrahmen-Rollstuhl, aber Ihre Fußplatte war bisher nicht geeignet für die Montage des "FreeWheel" ?

Das alles hat jetzt ein Ende! Der "FreeWheel" Adapter wird unter den Sitz des Rollstuhls gebaut und bietet somit eine Aufnahmemöglichkeit für das "FreeWheel".

Artikel Nr.: 20.08.20

Weitere Produkte ...



MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch " Tavolo 160 "

Der "Tavolo 160" hat eine max. Tragkraft von 5kg und kann neben dem Rollstuhltisch noch mit einer Tasche kombiniert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie lediglich mit einem Tablet oder Notebook arbeiten wollen und nur leichte Dinge transportieren.

Suchen Sie eine Halterung für einen Einkaufskorb, ist der "Shopper 150" die richtige Wahl !



MULTI-Rollstuhladapter als Foto-Stativ " Stativo 160 "

Als Basis für das Foto-Stativ "Stativo 160" dient der Rollstuhltisch "Tavolo 160". Mit Hilfe einer Erweiterung ist er als Foto-Stativ nutzbar.

Ausgestattet ist die Erweiterung mit einem Gewindeadapter mit 3/8" UNC auf 1/4" UNC Gewinde für alle gängigen Stativ-Neiger und auch dem Smartphone-Neiger.



MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch " Tavolo 150 "

Der "Tavolo 150" hat eine max. Tragkraft von 15kg und kann neben dem Rollstuhltisch noch mit einem Einkaufskorb, einer Tasche und einem Getränkeflaschen-Halter kombiniert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie mit einem Tablet oder Notebook arbeiten, unterwegs einen Tisch haben wollen und ihn für den größeren Einkauf nutzen.



MULTI-Rollstuhladapter für den Einkauf " Shopper 150 "

Als Basis für den "Shopper 150" dient der Rollstuhltisch "Tavolo 150". Mit Hilfe eines KLICKfix®-Halters kann dieser mit einem Einkaufskorb und einer Tasche, sowie einem Getränkeflaschen-Halter erweitert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie ihn für den größeren Einkauf nutzen, unterwegs einen Tisch haben wollen oder zu Hause mit einem Tablet oder Notebook arbeiten.



MULTI-Rollstuhladapter fürs Baby & Kind " Bambino 140 "

Mit dem "Bambino 140" kann ein Baby oder Kind, angeschnallt in einer Liegeschale für Babys oder Sitzschale für Kinder, sicher befördert werden und dies durch die Tragkraft von 18kg bis ca. zum 3. Lebensjahr.

Erweitern lässt sich der "Bambino 140" jederzeit mit einem Einkaufskorb, einer Tasche oder auch einem Rollstuhltisch. Mit dem "Bambino 140" und dem entsprechenden Zubehör sind Sie flexibel in der Art der Verwendung.

Der **M**ulti-Rollstuhladapter für den Einkauf "Shopper 150"

Mit wenigen Handgriffen lässt sich auch Ihr Rollstuhl um praktische Zusatzfunktionen erweitern.

Stempelfeld Sanitätshaus:



Kontakt:

Michael Tanneberger

Rheinkamper Str. 10 a
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 700 83
Handy: 0 176 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de

Fotos: M. Tanneberger

1. Auflage

www.rollstuhladapter.de

© Michael Tanneberger