

Der **Multi**-Rollstuhladapter  
für Baby & Kind "Bambino 140"

# Ihre neue Freiheit



*... beim Spazieren!*



*... beim Ausflug!*

Die Möglichkeiten mit dem  
"Bambino 140"

[www.rollstuhladapter.de](http://www.rollstuhladapter.de)

# "Bambino 140" mit der Liegeschale für Babys

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Beim MULTI-Rollstuhladapter "Bambino 140" können Sie Ihr Baby sicher in dem entsprechenden Aufsatz am Rollstuhl mitnehmen. Nun sind Sie zu Hause und auch unterwegs mit Ihrem Baby selbstständig und unabhängig.

Ein Baby wurde bisher meist unzureichend gesichert auf den Beinen transportiert. Bei einer noch so kleinen Unaufmerksamkeit drohte es herunter zu fallen und konnte sich dabei verletzen.

**Der MULTI-Rollstuhladapter schafft ein hohes Maß an Sicherheit für Ihr Baby !**

Die Liegeschale für Babys wurde speziell für den MULTI-Rollstuhladapter entwickelt und wird an diesen kinderleicht und sicher befestigt.

**Ihr Baby ist in der Liegeschale sicher angeschnallt**, befindet sich in Ihrem Blick und in Ihrer Reichweite. Wenn nötig, können Sie das Baby beruhigen oder in den Arm nehmen.

Durch die besondere Konstruktion des Adapters lässt sich die Liegeschale für Babys jederzeit verdrehen sowie in der Neigung und Höhe individuell und ergonomisch einstellen.

**Das Modell "Bambino 140" ist für die Fahrten außerhalb der Wohnung mit einem Vorsatzrad ausgestattet.** Das Vorsatzrad von 12,5 Zoll hebt die kleinen Vorderräder an und sorgt so für ein verbessertes Fahrverhalten und zugleich für die Federung.

Gleichzeitig zur Liegeschale lässt sich der Einkaufskorb oder die Tasche verwenden.

(Liegeschale für Babys ab der Geburt bis ca. 12 Monaten)



sicher

# "Bambino 140" mit der Sitzschale für Kinder

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Beim MULTI-Rollstuhladapter "Bambino 140" können Sie Ihr Kind (bis ca. zum 3. Lebensjahr) sicher in dem entsprechenden Aufsatz am Rollstuhl mitnehmen. Nun sind Sie zu Hause und auch unterwegs mit Ihrem Kind selbstständig und unabhängig.

Ist die Liegeschale für Babys zu klein geworden, kommt nun die Sitzschale für Kinder zum Einsatz. Ihr Kind fährt auch hier sicher und bequem mit Ihnen mit.

Die Befestigung der Sitzschale für Kinder an den MULTI-Rollstuhladapter ist ebenfalls kinderleicht und sicher. Ihr Kind ist sicher angeschnallt, befindet sich in Ihrem Blick und in Ihrer Reichweite.

Durch die besondere Konstruktion des Adapters lässt sich die Sitzschale für Kinder jederzeit verdrehen sowie in der Neigung, in der Weite und in der Höhe individuell und ergonomisch einstellen.

Das Modell "Bambino 140" ist für die Fahrten außerhalb der Wohnung mit einem Vorsatzrad ausgestattet. Das Vorsatzrad von 12,5 Zoll hebt die kleinen Vorderräder an und sorgt so für ein verbessertes Fahrverhalten und zugleich für die Federung.

Gleichzeitig zur Sitzschale lässt sich der Einkaufskorb oder die Tasche verwenden.

(Sitzschale für Kinder im Alter von 9 Monaten bis ca. 3 Jahren)



selbstständig

## Zubehör - Einkaufskorb / Tasche

Erweitern Sie den MULTI-Rollstuhladapter "Bambino 140" mit einem Einkaufskorb oder einer Tasche. Die verschiedenen Einkaufskörbe oder Taschen werden dabei von Ihnen auf einfache und sichere Weise mit Hilfe des KLICKfix® Systems am "Bambino 140" befestigt. Eine gleichzeitige Verwendung der Liegeschale für Babys oder der Sitzschale für Kinder ist möglich.

Bei Besorgungen und Einkäufen können Sie nun Ihr Baby oder Kind sicher angeschnallt im entsprechenden Aufsatz mitnehmen. Die Organisation einer geeigneten Betreuung entfällt. Dadurch sind Sie selbstständig und unabhängig.

### Verbessern Sie die Mobilität und Selbstständigkeit bei Ihrem Einkauf !

Mit dem MULTI-Rollstuhladapter "Bambino 140" haben Sie die Wahl. Der Einkaufskorb bzw. die Tasche kann natürlich auch ohne Liegeschale für Babys oder Sitzschale für Kinder genutzt werden. So können Sie mit oder ohne Kind Ihren Einkauf erledigen.

Der Einkauf lässt sich in beiden Fällen sicher im Einkaufskorb, der vor Ihren Beinen schwebt, verstauen.

In die Tasche passen z.B. alle Dinge, die sich normalerweise hinter Ihnen unsicher und unerreichbar in einem Rucksack befinden.

Durch die besondere Konstruktion des Adapters lässt er sich jederzeit verdrehen. Dadurch ist der Einkaufskorb und auch die Tasche noch besser erreichbar.



**bequem**

## Zubehör - Faltkorb

Für den größeren Einkauf können Sie den MULTI-Rollstuhladapter "Bambino 140" noch mit einem Faltkorb erweitern. Der Faltkorb wird an Stelle der Liegeschale für Babys oder der Sitzschale für Kinder an einer zuvor montierten Aufnahmeplatte am Universal-Träger befestigt.

Eine gleichzeitige Verwendung mit dem Einkaufskorb oder der Tasche ist möglich. Allerdings nicht mit der Liegeschale für Babys oder der Sitzschale für Kinder.

**Verbessern Sie die Mobilität und Selbstständigkeit bei Ihrem Einkauf !**

Der Einkauf lässt sich im Faltkorb und im Einkaufskorb sicher verstauen.

In die Tasche passen z.B. alle Dinge, die sich normalerweise hinter Ihnen unsicher und unerreichbar in einem Rucksack befinden.

Durch die besondere Konstruktion des Adapters lässt er sich jederzeit verdrehen. Dadurch ist der Einkaufskorb und auch die Tasche noch besser erreichbar.

**Mit dem MULTI-Rollstuhladapter "Bambino 140" und dem entsprechenden Zubehör sind Sie flexibel in der Art der Verwendung !**



# Zubehör - Rollstuhltisch

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0802)

Eine weitere Erweiterungsmöglichkeit für den "Bambino 140" ist der Rollstuhltisch. Der Rollstuhltisch wird an einer zuvor montierten Aufnahmeplatte am Universal-Träger befestigt. Er schwebt bequem über Ihren Beinen und ist ergonomisch einstellbar.

**Nun haben Sie immer ihren eigenen Tisch dabei !**

Nutzen Sie den Rollstuhltisch, um z.B. effektiv ein Tablet oder Notebook zu bedienen. Auch können Sie nun das Frühstück und andere Gegenstände sicher transportieren - zu Hause und auch unterwegs.

Der Rollstuhltisch ist groß genug für ein Notebook bis 15,4" incl. Mauspad.

Durch die besondere Konstruktion des Adapters lässt sich der Rollstuhltisch jederzeit verdrehen sowie in der Neigung, in der Weite und in der Höhe individuell und ergonomisch einstellen.

**Bringen Sie mehr Flexibilität & Erleichterung in Ihren Alltag !**

Der große **Vorteil gegenüber bekannten Therapietischen:**

Dieser Rollstuhltisch engt Sie nicht ein, lässt sich ergonomisch einstellen und kann an allen gängigen Rollstühlen befestigt werden.

Gleichzeitig zum Rollstuhltisch lässt sich der Einkaufskorb oder die Tasche verwenden.



**bequem**

# Zubehör - Vorsatzrad

**Option für Unterwegs:**

**Der MULTI-Rollstuhladapter kann für die Fahrten außerhalb der Wohnung mit einem Vorsatzrad erweitert werden.** Das Vorsatzrad von 12,5 Zoll hebt die kleinen Vorderräder an und sorgt so für ein verbessertes Fahrverhalten und zugleich für die Federung.



**zum Beispiel:**

**... ohne Vorsatzrad**

**Rollstuhltisch** in Kombination  
mit der Tasche.



**... mit Vorsatzrad**

**Faltkorb** in Kombination  
mit dem Einkaufskorb.

## "Bambino 140" für ein Sitzschalen-Untergestell

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Erweitern Sie mit dem MULTI-Rollstuhladapter "Bambino 140" einen Kinder-Rollstuhl oder ein Sitzschalen-Untergestell zum Geschwisterwagen.

Hier kommt der Adapteraufsatz für Babyschalen zum Einsatz. Eine handelsübliche Babyschale, in der Ihr Baby sicher angeschnallt ist, kann nun in den Adapter eingeklickt werden.

### Das Rollstuhlzubehör für Kinder-Rollstühle und Sitzschalen-Untergestelle !

Durch die besondere Konstruktion des Adapters lässt sich die Babyschale jederzeit verdrehen sowie in der Neigung, in der Weite und in der Höhe individuell und ergonomisch einstellen.

**Sie benötigen nun keinen Kinderwagen mehr !**

**Option** für Unterwegs:

Das Modell "Bambino 140" kann für die Fahrten außerhalb der Wohnung mit einem Vorsatzrad ausgestattet werden. Das Vorsatzrad von 12,5 Zoll hebt die kleinen Vorderräder an und sorgt so für ein verbessertes Fahrverhalten und zugleich für die Federung.

Gleichzeitig zur Babyschale lässt sich der Einkaufskorb oder die Tasche verwenden.



**weitere Einsatzmöglichkeiten**



## Informationen zur Beantragung des MULTI-Rollstuhladapters

### “Bambino 140“ zur Mitnahme eines Babys und Kindes

Der MULTI-Rollstuhladapter ist ein Zubehör für den Rollstuhl, um Ihnen als Rollstuhlfahrer das Alltagsleben zu erleichtern. Die Verwendung des Adapters mit der Liegeschale für Babys oder der Sitzschale für Kinder ist einfach, sicher und weltweit einzigartig.

Mit Hilfe des MULTI-Rollstuhladapters und seiner zahlreichen Aufsätze können Sie nun Ihren Alltag selbstständig und unabhängig gestalten.

#### So sollten die Angaben auf Ihrem Rezept stehen:

- MULTI-Rollstuhladapter “Bambino 140“ zur Mitnahme eines Babys und Kindes  
Abrechnungsposition: 18.99.99.0999

**Mögliche Kostenträger sind:** Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungen, Integrationsamt, Amt für Soziales . . .

#### Gerne besprechen wir mit Ihnen den Bestellvorgang!

Haben Sie Fragen zum MULTI-Rollstuhladapter? **Wir beraten Sie gerne!** Oder vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung bei Ihnen zu Hause.

Erleben Sie die Vorzüge und die vielfältigen Möglichkeiten des Adapters.



#### Kontakt:

**Michael Tanneberger**

Rheinkamper Str. 10 a  
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 700 83

Handy: 0 176 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de

## Bitte teilen Sie uns folgendes mit:

- Für welchen MULTI-Rollstuhladapter interessieren Sie sich?  
( "Bambino 140" / "Tavolo 140" / "Shopper 140" / "Tavolo 150" / "Shopper 150" /  
"Tavolo 160" / "Stativo 160" )
- An welchen Rollstuhl oder Rollstühlen soll der Adapter verwendet werden?  
(Falt-Rollstuhl z.B. OttoBock Avantgarde / Starrrahmen-Rollstuhl \_\_\_\_\_ / E-Rollstuhl \_\_\_\_\_ )
- Die Kommission
- Ist an dem ausgesuchten Rollstuhl schon ein Kupplungssystem eines Rollstuhlzuggerätes montiert?  
(z.B. SwissTrac / Speedy-Handbike etc.)
- Kommt ein E-Fix Antrieb oder Ähnliches zum Einsatz?
- Ist ein PKW-Haltesystem am Rollstuhl montiert oder wird eine Rollstuhl-Ladehilfe im PKW eingesetzt?

---

### Wichtig:

**Die max. Belastung des MULTI-Rollstuhladapter "Bambino 140" beträgt 18,0 Kg !**

**Bei Verwendung des MULTI-Rollstuhladapter "Bambino 140" verringert sich das max. Benutzergewicht für den Rollstuhl um 25 kg !**

# Der **M**ulti-Rollstuhladapter Teilekatalog "Bambino 140"





**KLIICKfix® Halter (ohne Schloss / für Körbe & Taschen / von Rixen&Kaul):**

Der KLIICKfix® Halter wird am Universal-Träger montiert. Hier können nun die verschiedenen Körbe und Taschen befestigt werden.

max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 20.10.10



**KLIICKfix® Halter (mit Schloss / für Körbe & Taschen / von Rixen&Kaul):**

Der KLIICKfix® Halter wird am Universal-Träger montiert. Hier können nun die verschiedenen Körbe und Taschen befestigt werden. Ein hochwertiges Metallschloss ist in die rote Taste fest integriert und sperrt zuverlässig den Auslösemechanismus. So ist der Einkaufskorb oder die Tasche maximal gesichert.

max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 20.10.20



**Einkaufskorb „Shopper Plus“ 24 Liter (von Rixen&Kaul):**

Der Einkaufskorb wird auf einfache Weise in den KLIICKfix® Halter angeklickt. Er ist ideal für den kleinen Einkauf oder den großen Ausflug, ausgestattet mit separatem Innenfach für Geldbörse und Schlüssel, Frontreflektor und abnehmbarer Regenhaube.

Maße: L: 38 cm, B: 29 cm, H: 25 cm / Volumen: 24 L / max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 20.10.40



**Einkaufskorb „Bikebasket“ 15 Liter (von Reisetel):**

(Designs: black / black dots coloured / millefleurs / artist stripes)

Der Einkaufskorb wird auf einfache Weise in den KLIICKfix® Halter angeklickt. Er ist ideal für den kleinen Einkauf oder den großen Ausflug, ausgestattet mit Fronttasche, Kordelverschluss, Innentasche mit Reißverschluss, Handyfach und abnehmbarem Utensilientäschchen.

Maße: L: 35 cm, B: 26 cm, H: 28 cm / Volumen: 15 L / max. Belastung: 5,0 Kg



Artikel Nr.: 20.10.60



### Tasche "Roomy" 4,0 Liter (von Rixen&Kaul):

- Designs: black / black dots coloured / black dots / twist silver / millefleurs -

Die Tasche wird auf einfache Weise in den KLICKfix®-Halter angeklickt. Sie ist ausgestattet mit RV-Frontfach, Hauptfach mit weiter Öffnung und innen liegenden separaten Extrafächern.

Maße: L: 24 cm, B: 13 cm, H: 22 cm / Volumen: 4,0 L / max. Belastung: 3,0 Kg

Artikel Nr.: 20.11.10



### Tasche "Allegra" 5,0 Liter (von Rixen&Kaul):

- Design: black -

Die Tasche wird auf einfache Weise in den KLICKfix®-Halter angeklickt. Sie ist ausgestattet mit RV-Frontfach, Hauptfach und beidseitigen Netztaschen.

Maße: L: 33 cm, B: 14 cm, H: 22 cm / Volumen: 5,0 L / max. Belastung: 3,0 Kg

Artikel Nr.: 20.11.20



### **Tasche "SmartBag Touch" 1,8 Liter (von Rixen&Kaul):**

- Designs: black / twist silver -

Die Tasche wird auf einfache Weise in den KLICKfix®-Halter angeklickt. Sie ist ausgestattet mit RV-Frontfach, Hauptfach mit mehreren Innenfächern und Smartphone-Fach im Taschendeckel (für Smartphones bis max. 18 x 9 cm). Das Smartphone bleibt durch die Folie weiter bedienbar.

Maße: L: 21 cm, B: 8 cm, H: 16 cm / Volumen: 1,8 L / max. Belastung: 2,0 Kg

Artikel Nr.: 20.11.30



### **Rucksack "Freepack City" 18 Liter (von Rixen&Kaul):**

- Design: twist silver -

Der Rucksack wird auf einfache Weise in den KLICKfix®-Halter angeklickt. Er ist ausgestattet mit zwei abgedeckten Frontfächern, seitlichen Fächern, separater Innentasche und Regenhülle.

Maße: L: 26 cm, B: 15 cm, H: 38 cm / Volumen: 18 L / max. Belastung: 5,0 Kg

Artikel Nr.: 20.11.40



**Faltkorb 24 Liter (incl. Befestigungsplatte):**

- Designs: grau / blau / grün -

Der Faltkorb 24 Liter wird auf einfache Weise an der montierten Aufnahmeplatte am Universal-Träger des MULTI-Rollstuhl adaptors befestigt und gesichert.

Maße: L: 43,5 cm, B: 31 cm, H: 21,3 cm / max. Belastung: 8,0 Kg

Artikel Nr.: 20.09.30



**Faltkorb 32 Liter (incl. Befestigungsplatte):**

- Designs: grau / blau / grün -

Der Faltkorb 32 Liter wird auf einfache Weise an der montierten Aufnahmeplatte am Universal-Träger des MULTI-Rollstuhl adaptors befestigt und gesichert.

Maße: L: 49 cm, B: 36 cm, H: 25 cm / max. Belastung: 10,0 Kg

Artikel Nr.: 20.09.40



### **Rollstuhltisch (incl. Befestigungsplatte & Anti-Rutsch-Matte):**



Der Rollstuhltisch wird auf einfache Weise an der montierten Aufnahmeplatte am Universal-Träger des MULTI-Rollstuhladapters befestigt und gesichert.

Über den Adapter kann der Rollstuhltisch in der Neigung, in der Höhe und in der Weite ergonomisch eingestellt werden.

Maße: L: 50 cm, B: 30 cm, H: 1,5 cm / max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 20.09.10 s - Farbe: schwarz

Artikel Nr.: 20.09.10 w - Farbe: weiß

### **KLICKfix® Halter "Bottle Klick" (incl. Getränkeflaschen-Halter):**



Der KLICKfix® -Halter "Bottle Klick" wird mit einer Spezialaufnahme am Rollstuhltisch montiert. Hier kann nun der Getränkeflaschen-Halter angeklickt werden.

max. Belastung: 1,0 Kg

Artikel Nr.: 20.15.40



**Weiteres Zubehör auf Anfrage !**

**Zubehör - Rollstuhltisch ...**



---

**Wichtig:**

**Die max. Belastung des MULTI-Rollstuhladapter "Bambino 140" beträgt 18,0 Kg !**

**Bei Verwendung des MULTI-Rollstuhladapter "Bambino 140" verringert sich das max. Benutzergewicht für den Rollstuhl um 25 kg !**



### Basis-Adapter 1.4 - MRA:

(gefertigt aus Edelstahl)

Der Basis-Adapter 1.4 - MRA ist **geeignet für** die meisten **Falt-Rollstühle, Starr-rahmen-Rollstühle und einige E-Rollstühle**. Der Basis-Adapter 1.4 - MRA kann kinderleicht zwischen Sitzbespannung und Sitzkissen montiert und auch wieder demontiert werden.

Der Basis-Adapter 1.4 - MRA dient zur Aufnahme des Aufbau-Adapter 3.1 & 3.2.

Artikel Nr.: 20.01.40

Gewicht: 1.400 g



### Aufbau-Adapter 3.1

(gefertigt aus Edelstahl)

**(geeignet zur Abstützung auf die Fußplatte)**

Der Aufbau-Adapter 3.1 wird in den Basis-Adapter 1.4 - MRA eingeklickt. Ein schwenk- und teleskopierbares Rohr stützt sich entweder auf die Fußplatte oder das Vorsatzrad ab.

**Wichtig:** Die Fußplatte (geteilt oder durchgehend) muss vorhanden sein.

Der Aufbau-Adapter 3.1 besteht aus einem senkrechten Rohr incl. Zapfen, einem schwenk- und teleskopierbaren Rohr sowie einem Schnellspanner.

Artikel Nr.: 20.03.10

Gewicht: 900 g



### Aufbau-Adapter 3.2

(gefertigt aus Edelstahl)

**(geeignet zur Sicherung an zwei Aufnahmen)**

Der Aufbau-Adapter 3.2 wird in den Basis-Adapter 1.4 - MRA eingeklickt. Die Erweiterung für den Basis-Adapter 1.4 - MRA wird dabei an zwei zuvor montierten Rohrschellenaufnahmen mit je einem Bolzen werkzeuglos gesichert.

Der Aufbau-Adapter 3.2 besteht aus einem senkrechten Rohr incl. Zapfen, zwei Rohrschellenaufnahmen und einer Erweiterung für den Basis-Adapter 1.4 - MRA sowie einem Schnellspanner.

Artikel Nr.: 20.03.20

Gewicht: 1.200 g



### Neigungsverstellung (für Aufbau-Adapter 3.1 & 3.2):

Die Neigungsverstellung dient zum Ausgleich der Neigung bei Verwendung des Vorsatzrades in Kombination mit der Liegeschale für Babys oder der Sitzschale für Kinder.

Die Neigungsverstellung besitzt eine Griffschraube zur werkzeuglosen Neigungsverstellung des senkrechten Rohres.

Artikel Nr.: 20.03.30

Gewicht: 250 g

## Basis- & Aufbau-Adapter



### senkrecht Element:

(aus Aluminium)

Das senkrechte Element wird in den Aufbau-Adapter eingeschoben. Es lässt sich durch einen Schnellspanner fixieren und dadurch leicht in der Höhe einstellen und verdrehen.

Das senkrechte Element besitzt eine Hebelschraube zur werkzeuglosen Neigungsverstellung der Aufsätze und einen Stelling um das Verdrehen auch unter Last zu ermöglichen.

Artikel Nr.: 20.04.10

Gewicht: 470 g



### Universal-Träger (ohne Erweiterung):

(gefertigt aus Edelstahl)

Der Universal-Träger dient der Aufnahme folgender Bauteile:

- **Aufnahmeplatte mit Verriegelung**  
zur einfachen Befestigung des Rollstuhltisches und der Faltkörbe.
- **KLICKfix® Halter**  
zur einfachen Befestigung der Einkaufskörbe und Taschen.

Artikel Nr.: 20.05.10

Gewicht: 480 g



### Universal-Träger (mit Erweiterung):

(gefertigt aus Edelstahl)

Zusätzlich zur Aufnahmeplatte und dem KLICKfix® Halter kann hier der Befestigungsbügel für die Liegeschale für Babys und Sitzschale für Kinder befestigt werden.

Die Griff-Schrauben sind mit einem Band gegen Verlust gesichert.

Artikel Nr.: 20.05.30

Gewicht: 520 g



### Aufnahmeplatte mit Verriegelung (für Rollstuhltisch & Faltkörbe):

Die Aufnahmeplatte dient der einfachen Befestigung des Rollstuhltisches und der Faltkörbe.

Artikel Nr.: 20.06.10

Gewicht: 150 g



### Befestigungsbügel (für Querträger, Liegeschale & Sitzschale):

Der Befestigungsbügel wird am Querträger, an der Liegeschale für Babys oder der Sitzschale für Kinder montiert und dient der einfachen Befestigung am Universal-Träger mit Erweiterung.

Artikel Nr.: 20.06.30

Gewicht: 400 g



### Querträger (incl. Aufnahme):

Der Querträger incl. Aufnahme kommt bei Sitzschalen-Untergestellen oder bei Kinder-Rollstühlen zum Einsatz, wenn diese zum Geschwisterwagen werden sollen.

Er dient der Aufnahme handelsüblicher Babyschalen (bei Verwendung entsprechender Zwischenadapter). Der Querträger wird entweder direkt am senkrechten Element oder mit der Erweiterung, dem Befestigungsbügel, am Universalträger montiert.

optionales Zubehör: Befestigungsbügel

Artikel Nr.: 20.07.10

Gewicht: 1.060 g

### ABC-Design® Zwischenadapter:



Dieser Zwischenadapter wird benötigt um folgende Babyschalen verwenden zu können:

- Maxi-Cosi® (Citi SPS, CabrioFix, Pebble),
- Cybex® (Aton Basic, Aton, Aton 4, Aton Q, Cloud Q),
- kiddy® (Evolution pro, Evolution pro 2, Evolunafix)

Artikel Nr.: 20.07.15

Gewicht: 300 g



### Liegeschale für Babys:

Die Liegeschale ist für Babys ab der Geburt und bis ca. 12 Monaten geeignet. Das Baby kann mit dem 3-Punkt Gurt sicher angeschnallt werden. Der Universal-Träger muss für die Aufnahme mit einer Erweiterung ausgestattet sein.

benötigtes Zubehör: Befestigungsbügel

Artikel Nr.: 20.07.30

Gewicht: 1.170 g



### Sitzschale für Kinder:

Die Sitzschale ist für Kinder ab 9 Monaten und bis ca. 3 Jahren geeignet. Das Kind kann mit dem 3-Punkt Gurt sicher angeschnallt werden. Der Universal-Träger muss für die Aufnahme mit einer Erweiterung ausgestattet sein.

benötigtes Zubehör: Befestigungsbügel / max. Belastung: 18,0 Kg

Artikel Nr.: 20.07.40

Gewicht: 1.400 g

## Vorsatzrad "FreeWheel"

- Vertrieb in Deutschland von „The Rolling Company“ / [www.therollingcompany.de](http://www.therollingcompany.de)



Das "FreeWheel" kann Sie auf Ihrer Tour über Stock und Stein unterstützen. Es erleichtert das Überwinden von Hindernissen und gibt ein Gefühl von Freiheit und Sicherheit bei grenzenloser Mobilität!

Das "FreeWheel" ist Ihr Ticket um sicher und schnell über jede Art von Untergrund zu kommen und sich nicht mehr über Löcher in der Straße, Dreck, Steine, Matsch oder Schnee ärgern zu müssen. Als aktiver Rollstuhlfahrer werden Sie das "FreeWheel" lieben.

In wenigen Sekunden ist das "FreeWheel" an Ihrem Starrrahmen-Rollstuhl befestigt und hebt die Vorderräder an um aus dem Rollstuhl ein Gelände-Dreirad zu machen.

Mit dem "FreeWheel" können Sie sicher über Oberflächen rollen, die sonst nahezu unmöglich wären. Man braucht nicht mehr ständig im Wheelie über Rasenflächen, Kanten oder Schotterpisten fahren, sondern rollt einfach normal drüber.

### Kompatibilität:

Das "FreeWheel" passt an viele gängige Starrrahmen-Rollstühle, die eine Fußplatte bzw. einen Fußbügel haben.

Artikel Nr.: 20.08.10

### Adapter für Vorsatzrad "FreeWheel":



Sie haben einen falt-Rollstuhl und möchten trotzdem das "FreeWheel" nutzen? Sie haben zwar einen Starrrahmen-Rollstuhl, aber Ihre Fußplatte war bisher nicht geeignet für die Montage des "FreeWheel" ?

Das alles hat jetzt ein Ende! Der "FreeWheel" Adapter wird unter den Sitz des Rollstuhls gebaut und bietet somit eine Aufnahmemöglichkeit für das "FreeWheel".

Artikel Nr.: 20.08.20



### **Basis-Adapter 1.8 - SRT:**

(gefertigt aus Edelstahl)

Der Basis-Adapter 1.8 - SRT kommt bei **Sonderkonstruktionen** zum Einsatz. Wie z.B. bei einem Sitzschalen-Untergestell oder einigen E-Rollstühlen.

Der Basis-Adapter 1.8 - SRT dient zur Aufnahme der Aufbau-Adapter 2.2 & 2.4.

Artikel Nr.: 20.01.80

Gewicht: 2.250 g



### **Aufbau-Adapter 2.2:**

(gefertigt aus Edelstahl)

Der Aufbau-Adapter 2.2 wird in den Basis-Adapter eingeschoben und mit einem Bolzen gesichert.

Der Aufbau-Adapter 2.2 besteht aus einem senkrechten Rohr incl. Bolzen und einem Schnellspanner.

Artikel Nr.: 20.02.20

Gewicht: 720 g



### **Aufbau-Adapter 2.4:**

(gefertigt aus Edelstahl)

Der Aufbau-Adapter 2.4 wird in den Basis-Adapter eingeschoben und mit einem Bolzen gesichert. Zwei Schrauben sorgen für einen einfachen **Neigungsausgleich** des senkrechten Rohres.

Der Aufbau-Adapter 2.4 besteht aus einem senkrechten Rohr incl. Bolzen und einem Schnellspanner.

Artikel Nr.: 20.02.40

Gewicht: 1.160 g

# Weitere Produkte ...



## **MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch " Tavolo 160 "**

Der "Tavolo 160" hat eine max. Tragkraft von 5kg und kann neben dem Rollstuhltisch noch mit einer Tasche kombiniert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie lediglich mit einem Tablet oder Notebook arbeiten wollen und nur leichte Dinge transportieren.

Suchen Sie eine Halterung für einen Einkaufskorb, ist der "Shopper 150" die richtige Wahl !



## **MULTI-Rollstuhladapter als Foto-Stativ " Stativo 160 "**

Als Basis für das Foto-Stativ "Stativo 160" dient der Rollstuhltisch "Tavolo 160". Mit Hilfe einer Erweiterung ist er als Foto-Stativ nutzbar.

Ausgestattet ist die Erweiterung mit einem Gewindeadapter mit 3/8" UNC auf 1/4" UNC Gewinde für alle gängigen Stativ-Neiger und auch dem Smartphone-Neiger.



## **MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch " Tavolo 150 "**

Der "Tavolo 150" hat eine max. Tragkraft von 15kg und kann neben dem Rollstuhltisch noch mit einem Einkaufskorb, einer Tasche und einem Getränkeflaschen-Halter kombiniert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie mit einem Tablet oder Notebook arbeiten, unterwegs einen Tisch haben wollen und ihn für den größeren Einkauf nutzen.



## **MULTI-Rollstuhladapter für den Einkauf " Shopper 150 "**

Als Basis für den "Shopper 150" dient der Rollstuhltisch "Tavolo 150". Mit Hilfe eines KLICKfix®-Halters kann dieser mit einem Einkaufskorb und einer Tasche, sowie einem Getränkeflaschen-Halter erweitert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie ihn für den größeren Einkauf nutzen, unterwegs einen Tisch haben wollen oder zu Hause mit einem Tablet oder Notebook arbeiten.



## **MULTI-Rollstuhladapter fürs Baby & Kind " Bambino 140 "**

Mit dem "Bambino 140" kann ein Baby oder Kind, angeschnallt in einer Liegeschale für Babys oder Sitzschale für Kinder, sicher befördert werden und dies durch die Tragkraft von 18kg bis ca. zum 3. Lebensjahr.

Erweitern lässt sich der "Bambino 140" jederzeit mit einem Einkaufskorb, einer Tasche oder auch einem Rollstuhltisch. Mit dem "Bambino 140" und dem entsprechenden Zubehör sind Sie flexibel in der Art der Verwendung.

# Der **Multi**-Rollstuhladapter für Baby & Kind "Bambino 140"

Mit wenigen Handgriffen lässt sich auch Ihr Rollstuhl um praktische Zusatzfunktionen erweitern.

Stempelfeld Sanitätshaus:



## Kontakt:

**Michael Tanneberger**

Rheinkamper Str. 10 a  
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 700 83

Handy: 0 176 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de

Fotos: M. Tanneberger

1. Auflage

[www.rollstuhladapter.de](http://www.rollstuhladapter.de)

© Michael Tanneberger